

Jak użyć worka biodegradowalnego Flair Active Xtra[®]?

Trzy proste kroki użycia worka, zdjęcia zewnętrznej części i pozbycia się wewnętrznego worka (wewnętrznej wkładki) z wykorzystaniem toalety.

Krok 1.

Przytrzymując mocno jedną ręką przylepiec na skórze, drugą ręką złap od strony wewnętrznej (od strony ciała) biały uchwyt worka zewnętrznego i zdecydowanie zdejmij go – odrywając jego mocowanie od wewnętrznego worka.



Krok 2.

Używając drugiej ręki, ciągnij biały uchwyt worka zewnętrznego w dół, a następnie odklej od skóry wewnętrzny worek z przylepcem.



Krok 3.

Czysty zewnętrzny worek może być przeznaczony do recyklingu lub w wygodny sposób wyrzucony do kosza/pojemnika na odpady higieniczne. Dla pewności wyrzucając worek wewnętrzny (wkładkę wewnętrzną) do toalety - wrzuć tak, aby przylepiec był na wierzchu, a wkładka wypełniła się częściowo wodą przed ostatecznym spłukaniem.



Flair Active Xtra® - to proste pozbycie się zużytego worka stomijnego.

Worek Flair Active Xtra® został zaprojektowany do łatwego pozbycia się – jest splukiwalny w każdej toalecie. Jeśli w toalecie możesz splukać papier toaletowy – w domu, w podróży statkiem lub samolotem – możesz również splukać biodegradowalny worek Flair Active Xtra® (pamiętaj o dokładnym zastosowaniu .sie do instrukcji użycia).